



**EMDRFIRST TERAPİ ASİSTANI  
KULLANMA KLAVUZU**

## TİTREŞİM VE KULAKLIĞIN MONTE EDİLMESİ

Titreşim aparatlarının bağlı olduğu kablunun ucu, 8 numaralı sokete tam oturacak şekilde takılmalıdır. Kulaklığın kablosunun ucu, 9 numaralı sokete tam oturacak şekilde takılmalıdır.



## CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI

Cihazın çalıştırılması için 4 numaralı tuşun “on” konumuna getirilmesi gerekmektedir. Cihazın kapatılması için 4 numaralı tuşun “off” konumuna getirilmesi gerekmektedir.

## CİHAZIN DÜĞMELERİNİN KULLANIMI

Cihazın 7 numaralı tuşu ile kulaklıkta gelecek sesin şiddeti ayarlanabilmektedir. 7 numaralı tuş en alt kısımda iken ses en kısık düzeydedir. Sesi arttırmak için bu tuş yukarı doğru hareket ettirilmelidir. En üst kısımda ses şiddeti en yüksek düzeye ulaşmış olur. Cihazın 6 numaralı tuşu ile titreşim aparatlarının titreşim şiddeti ayarlanabilmektedir. 6 numaralı tuş en alt kısımda iken titreşim şiddeti en düşük düzeydedir. Titreşim şiddeti arttırılmak için bu tuş yukarıya doğru hareket ettirilmelidir. En üst kısımda titreşim şiddeti en yüksek düzeye ulaşmış olur. Cihazın 5 numaralı tuşu ile , titreşim aparatlarındaki sağ-sol, kulaklık taki sesin sağ-sol ve cihaz üzerindeki 1-3 ışıklarının sağ-sol atım uyarımlarının arasındaki süre ayarlanmaktadır. 5 numaralı tuş en alt kısımda iken sağ-sol arasındaki atım süresi en yüksektir.(Yaklaşık 2sn). sağ-sol arasındaki atım süresi azaltılmak için tuş yukarı doğru hareket ettirilmelidir. En üst kısımda atım süresi en kısa düzeye ulaşmış olur.

## GARANTİ ŞARTLARI

Cihazınız aldığınız günden itibaren 2 yıl boyunca garanti kapsamındadır. Garantiye dahil olan kısımlar cihazın ana gövdesi ve titreşim aparatlarıdır. Kablo ve kulaklık sarf malzeme olduğundan garanti kapsamına girmemektedir. Kırılmış, aşırı darbe görmüş, su girmiş, üzerinde tamir yapılmaya çalışmış ürünler garanti dışı kalmaktadırlar. Garanti takibini, sipariş sırasında verdiğiniz cep telefonu numaranız yada mail adresiniz ile site üzerinden yapabilirsiniz.

Her türlü sorunuz için aşağıdaki iletişim yöntemlerinden biri ile kolayca bize ulaşabilirsiniz.

**Telefon:** 0541 362 22 52

**Mail:** [destek@emdrstore.com](mailto:destek@emdrstore.com)

**Web:** [www.emdrstore.com](http://www.emdrstore.com)

**Sosyal media:** @emdrstore

1. SOL ATIM GÖSTERGE LEDİ
2. PİL DOLULUK GÖSTERME LEDİ
3. SAĞ ATIM GÖSTERGE LEDİ
4. CİHAZI AÇ-KAPA TUŞU
5. İKİ ATIM ARASINDAKİ SÜREYİ AZALTMA-ARTTIRMA
6. TİTREŞİM ŞİDDETİNİ ARTTIRMA-AZALTMA
7. KULAKLIK SES AÇMA-KISMA
8. TİTREŞİM APART ÇIKIŞI
9. KULAKLIK ÇIKIŞI